

Instruks – Oprettelse af parallelkontroller i WebQuality

Alle praksis modtager en liste over deres apparater i almen praksis fra deres laboratoriekonsulent. Laboratoriekonsulenten har tildelt hvert apparat et apparatnummer.

Det er vigtigt, at den rigtige apparattype og det tilhørende apparatnummer indtastes korrekt, når der oprettes en parallelkontrol i WebQuality.

Nedenstående liste for en fiktiv praksis er brugt som eksempel til oprettelse af parallelkontroller udført på deres 2 INR-apparater.

Analyse i Praksis	Apparat i Praksis	Serie nummer	Apparat nr.	I Brug fra dato
C-Reaktivt Protein - CRP	QuikRead go	343434343	Apparat 1	1/9 - 2026
	QuikRead go	2323232323	Apparat 2	1/9 - 2026
INR	MicroINR	1111111111	Apparat 1	1/9 - 2026
	MicroINR	2323343456	Apparat 2	1/9 - 2026
Hæmoglobin - Hb	Hemocue 201+, Hb	1212121212	Apparat 1	1/9 - 2026
Glucose - Glu	Hemocue 201+, glucose	3333333333	Apparat 1	1/9 - 2026
Leukocytter - LKC	HemoCue WBC	2222222222		1/9 - 2026

1. Gå i Webreq vha. af det fiktive CPR nr. 270513-6QW~~X~~ (~~X~~ Praksisspecifikt)
2. Vælg de ønskede analyser
Er der lavet parallelkontroller på 2 INR-apparater, gøres således:
Vælg begge INR-analyser

WebQuality

☐	Hæmoglobin (PN);B(vB)	▼
☐	C-reaktivt protein [CRP] (PN);P	▼
☐	Kalium (PN);P	▼
☐	Kreatinin (PN);P	▼
☐	Natrium (PN);P	▼
☒	INR (PN);P(kB)	▼
☒	INR (PN);P(vB)	▼
☐	Glukose (PN);P(vB)	▼
☐	Leukocytter (PN);B	▼

3. Klik på 'Oplysninger'

4. Indtast resultat og vælg Apparattype og Apparat nr. i de respektive rullemenuer

Prøvetagningstid

16-07-2026 11:02

Analyseresultat (INR (PN);P(kB)) *	2,1	Analyseresultat (INR (PN);P(vB)) *	3,2
Anvendt apparatur (INR apparaturtype;P(kB)) *	microINR	Anvendt apparatur (INR apparaturtype;P(vB)) *	microINR
Anvendt apparaturnr. (INR apparaturnr.;P(kB)) *	Apparatnr. 1	Anvendt apparaturnr. (INR apparaturnr.;P(vB)) *	Apparatnr. 2

5. Klik på 'Udfør'

6. Klik på 'Udskriv'

7. Labels fra rekvisitionen påsættes veneprovne, der sendes til analyse på Blodprøver og Biokemi

Jeres svar på jeres parallelkontroller ses i jeres laboratoriesystem. Kvaliteten på de indsendte parallelkontroller angives som en Ratioværdi. Er parallelkontrollen 'Ikke tilfredsstillende', er den markeret på samme måde i jeres lægesystem som et

unormalt blodprøvesvar. F.eks. skrevet med rødt. Hjælp til tolkning af ratiosvar, se nedenstående skema.

Parallelanalyse – Tolkning af ratio

Analyse	Ratio	$\frac{\text{praksisresultat}}{\text{laboratorieresultat}} = \text{Ratioværdi}$
Glukose	<0,82	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,82-0,88	Mindre tilfredsstillende
	0,89-1,11	Tilfredsstillende
	1,12-1,18	Mindre tilfredsstillende
	>1,18	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
Hæmoglobin	<0,84	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,84-0,88	Mindre tilfredsstillende
	0,89-1,11	Tilfredsstillende
	1,12-1,16	Mindre tilfredsstillende
	>1,16	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
CRP	<0,59	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,59-0,67	Mindre tilfredsstillende
	0,68-1,32	Tilfredsstillende
	1,33-1,41	Mindre tilfredsstillende
	>1,41	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
INR	<0,74	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,74-0,79	Mindre tilfredsstillende
	0,80-1,20	Tilfredsstillende
	1,21-1,26	Mindre tilfredsstillende
	>1,26	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
Leukocytter	<0,68	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,68-0,74	Mindre tilfredsstillende
	0,75-1,25	Tilfredsstillende
	1,26-1,32	Mindre tilfredsstillende
	>1,32	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
HbA _{1c}	<0,81	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,81-0,85	Mindre tilfredsstillende
	0,86-1,14	Tilfredsstillende
	1,15-1,19	Mindre tilfredsstillende
	>1,19	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol

Hvis jeres parallelkontrol ikke godkendes, enten pga. en ikke tilfredsstillende kvalitet, venepreven er koaguleret eller andet, vil i altid modtage en opfølgende mail fra jeres laboratoriekonsulent.