
	Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.					Niveau: Øvrigt
	BRAF V600E mutationsanalyse					
Dokumentbrugere: OUH /Eksamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Thomas K Kristensen	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 519520 /	Ref.	Version: 1	Godkendt af: Annelise Olsen 03.10.2016

1) Indikation

BRAF V600E mutationsanalysen er primært relevant ved hårcelleleukæmi (HCL). Analysen kan også være relevant ved myelomatose (MM) og andre hæmatologiske diagnoser.

2) Analysesprincip

BRAF V600E mutationspecifik kvantitativ real-time PCR.

3) Prøvemateriale og rekvisition

Mængde:

KM aspirat: 2-3 ml. stabiliseret i EDTA glas.

Alternativt anvendes 20 ml perifert blod stabiliseret i EDTA glas.

HUSK at vende prøven, så materialet ikke koagulerer.

Analysen kan desuden udføres på formalin fikseret paraffin indstøbt vævsmateriale (ex. KM koagel). Dette kan være uegnet pga. lav kvalitet/kvantitet af det oprensede DNA.

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra Cosmic, kategori "PCR".
- For rekvirenter udenfor OUH udprintes rekvisition seddel, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.

4) Prøveforsendelse

- Prøven skal være AKP i hænde indenfor 24 timer.
- Prøven opbevares og sendes ved stuetemperatur (må ikke nedfryses).

5) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30.
- Vær opmærksom på at fristen for indlevering af prøver på fredage samt dage før helligdage er senest kl. 13.00.

6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedrørende prøveforsendelse, melding af prøve: Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedrørende prøvesvar og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

7) Bemærkninger

Ingen.