
	Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.					Niveau: Øvrigt
	TP53 mutationsanalyse					
Dokumentbrugere: OUH /Eksamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Thomas K Kristensen	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 519538 /	Ref.	Version: 1	Godkendt af: Annelise Olsen 03.10.2016

1) Indikation

TP53 mutationsanalyse er primært relevant ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), men kan udføres for alle hæmatologiske diagnoser efter behov.

2) Analysesprincip

Targeteret next generation sequencing (NGS) af den kodende del af TP53 genot.

3) Prøvemateriale og rekvirition

Mængde:

20 ml perifert blod stabiliseret i EDTA glas.

Alternativt anvendes 2-3 ml knoglemarvsaspirat stabiliseret i EDTA glas.

HUSK at vende prøven, så materialet ikke koagulerer.

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra Cosmic, kategori "PCR".
- For rekvirenter udenfor OUH udprintes rekvirition seddel, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.

4) Prøveforsendelse

- Prøven skal være AKP i hænde indenfor 24 timer.
- Prøven opbevares og sendes ved stuetemperatur (må ikke nedfryses).

5) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30.
- Vær opmærksom på at fristen for indlevering af prøver på fredage samt dage før helligdage er senest kl. 13.00.

6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedr. prøveforsendelse, melding af prøve: Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedr. prøvesvar og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

7) Bemærkninger

Ingen.