

Temadag for praksis personale, Frederik VI's Hotel d.6. Februar 2018

Orion Diagnostica

QuikRead go[®]

go



QuikRead go CRP og QuikRead go CRP+Hb
Pålidelig - Hurtig - Nem at bruge



Nem at bruge

- Nem og fleksibel testprocedure
- Prøven kan opbevares i bufferen i to timer
- Prøven kan opbevares i kapillæren i 15 minutter
- Udført på en enkelt finger prik blodprøve, alternativt venøst blod, plasma eller serum

Opbevaring af reagenser

Komponenter		Opbevaring ved 2...8°C	Opbevaring ved 18...25°C
Reagenslåg	Uåbnet	Indtil kittets udløbsdato	24 timer / dag – 1 måned 7.5 time / dag – 3 måneder
	Åbnet	Indtil kittets udløbsdato	24 timer / dag – 1 måned 7.5 time / dag – 3 måneder
Kuvetter	Uåbnet folieindpakning	Indtil kittets udløbsdato	Indtil kittets udløbsdato
	Åbnet folieindpakning	6 måneder	3 måneder
Åbnet kuvetter		2 timer	2 timer
QuikRead go CRP kontrol	Uåbnet	Indtil kittets udløbsdato	Ingen opbevaring
	Åbnet	2 måneder	Ingen opbevaring

Prøveudtagning finger prik blodprøve



1 Tag prøven fra en varm eller opvarmet hånd. Prøveudtagningsstederne er siderne af langfingeren og ringe fingeren.



2 Rengør finger med en Alkohol pad. En swipe er nok. Lad fingeren tørre.



3 Støt prøvetagningen med din tommelfinger. Brug pege og langfinger, klem/massér prøvefinger langs hele dens længde, gerne helt fra håndfladen for at få prøveudtagningsstedet til at svulme op og blodet lettere løber til.



4 Placer lancetten mod huden med let pres og punkter huden ved hjælp af en lancet af passende størrelse og slip presset derefter.



5 Tør den første dråbe af. Massér og pres fra håndflade og ned af finger, for at undgå væsvæske. Brug næste dråbe til indsamling af den egentlige stikprøve. Klem prøvefinger fast men ikke kontinuerligt.



6 Indsæt stemplet i den blå ende af kapillærret. Når du fylder kapillærret, hold den lidt vippet opad og fyld op til den hvide vatprop. Kapillærret fyldes af sig selv, når du holder den mod bloddråben. Pas på ikke at få luftbobler.



7 Tør eventuelt resterende blod udenpå kapillærret af meget forsigtig.

Korrekt prøve indsamlingsteknik:

- Opvarm hænderne
- Undgå malkning
- Undgå kontinuerlig klemning

QuikRead go CRP and CRP+Hb tests

Kort brugsvejledning



1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Væskens overflade skal være mellem de to linjer på kuvetten. Berør ikke de klare, flade overflader på kuvettens nederste del.



2 Fyld kapillærrøret med prøvematerialet (20 µl) op til den hvide stopklods. Kontroller, at der ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tør eventuelt overskydende prøvemateriale af kapillærrørets yderside.



3 Anbring prøven (20 µl) i bufferopløsningen i kuvetten, og tilsæt prøven ved at trykke stemplet ned. Kontroller, at kapillærrøret er helt tomt.



4 Luk kuvetten helt tæt med et CRP reagenslæg. Tryk ikke den inderste blå del af låget ned. Når prøven er tilsat bufferen, skal testen køres inden for to timer.



5 Vælg Måling på displayet på QuikRead go instrumentet.



6 Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregekoden skal vende ud mod en selv. Displayet viser, hvordan målingen forløber.



7 Når målingen er gennemført, vises resultatet på displayet, og kuvetten vil automatisk komme op af aflæsningsbrønden. For QuikRead go CRP+Hb testen bliver Hb-resultatet vist nedenunder CRP-resultatet.

*Læs venligst
brugsvejledningen,
inden testen udføres.*

Læs venligst
brugsvejledningen
inden testen udføres