

Speedy Quick-Release Holder

Skrues kanylen ikke korrekt i holderen, skiller kanylen og kanyleholder ad under prøvetagning.

Dette sker, når kanylen 'skrues over', da dette medfører, at kanylen reelt løsnes fra kanyleholderen Speedy Quick-Release Holder. Derfor er det vigtigt, at nedenstående vejledning følges.

Vejledning til at skru kanyle på Speedy Quick-Release Holder

1. Når kanylen skrues på kanyleholderen Speedy Quick-Release Holder, skal der holdes på den blå udløsermekanisme. Markeret med den blå pil på billedet.



2. Hvis kanylen er 'overskruet', vil den blå udløsermekanisme markeret med pilen ikke længere flugte med kanyleholderen, men være 2 - 3 mm forskudt i forhold til kanyleholderen.
3. Er kanylen 'overskruet', kasseres både kanyle og kanyleholder.

Vejledning til at klikke kanylen af Speedy Quick-Release Holder

1. Efter endt prøvetagning holdes kanylen ind over kanylespanden.
2. Prøvetager trykker på den blå udløsermekanisme. Markeret med den blå pil.



3. Kanylen løsnes fra kanyleholderen og falder ned i kanylespanden.
4. Kanyleholderen er igen klar til brug.