


Quick-guide Formalinsystem

Klargøring:

Sørg for, at formalinsystemet er tæt og ubeskadiget, inden det anbringes i holderen.

VIGTIGT! Kontrollér, at væsken i formalinsystemet er **farveløs, klar og gennemsigtig**.
Ved det mindste tegn på uklarhed eller misfarvning: **KASSÉR STRAKS SYSTEMET.**

- i** Formalinsystemet er lukket, når hanen er i horisontal position.
Systemet skal altid være lukket, når det ikke er i brug.




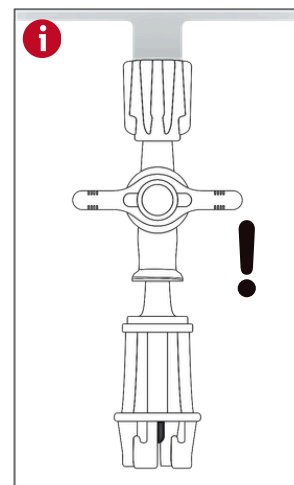


Anvendelse:

- 1** Skru låget af S-Monovetten®, og kom prøven ned i røret. Skru låget på S-Monovetten® igen.
- 2** Tilslut S-Monovetten® til formalinsystemets adapter, og fastgør forbindelsen ved at dreje S-Monovetten® ca. 2-3 mm til højre.
- 3** Åbn hanen ved at dreje den 90°. Efterfølgende fyldes S-Monovetten® med formalin ved at trække stemplet helt ned. Det anbefales, at mængden af formalin udgør minimum 10 gange vævsprøvens størrelse.

VIGTIGT! Hold fast i stemplet for at undgå tilbageløb.
Fyld ikke S-Monovetten® hurtigere end vakuum udlignes.
Der skal **ALTID** være luft tilbage i toppen af S-Monovetten®.
Tryk ALDRIG stemplet mod udtagningsretningen!
Skulle dette ske, skal systemet bortskaffes.

- 4** Luk systemet ved at dreje hanen 90° tilbage til horisontal position. For at løsne S-Monovetten® fra systemet skal du dreje den ca. 2-3 mm til venstre.
Kontrollér, at vævsprøven er dækket af formalin og flyder.
Knæk stemplet på S-Monovetten® af. For 9 ml røret skal stemplet låses med et klik, inden stemplet knækkes af.

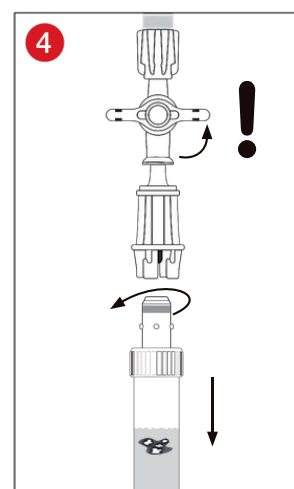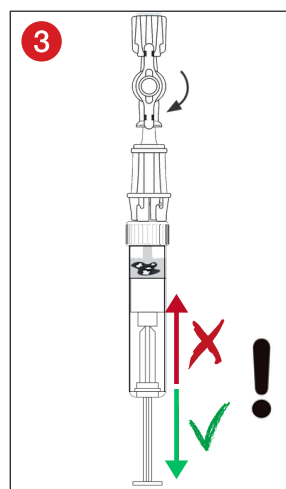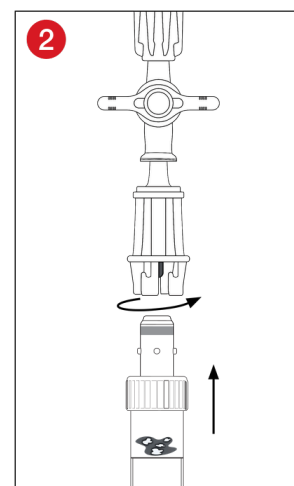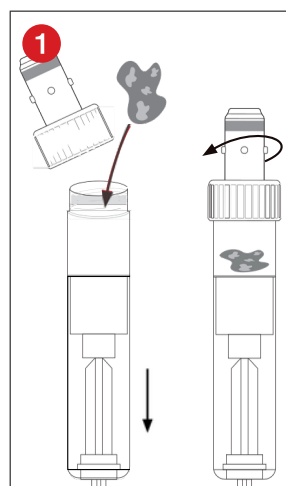

Bemærk:

Denne quick-guide kan ikke stå i stedet for den medfølgende manual.
Følg nøje den originale manual, som følger med produktet inden brug.
Kontakt Hounisen® ved spørgsmål til produktet eller betjeningen heraf.