

## **Optimal overførelsteknik med DivibaX®**

### **Gode råd fra Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø**

- **Håndter det koblede produkt tæt på kroppen**
- **Hold skuldrene nede og afslappet**
- **Undgå yderstillinger i hånd- og fingerled**
- **Anvend de store muskelgrupper ved overførsel af væske, dvs. begge hænder og brystmuskulatur, ikke fingerkraft alene**
- **Fjern den gule sikkerhedslås med et let tryk af 1-2 fingre**
- **Drej den grønne omløber med små lette bevægelser, gerne ved kombineret rotation med begge hænder**
- **Overfør væske som vist på video, lad fingerspidserne følge hætteglassets orientering**
- **Giv systemet tid til at trykudligne under overførslen og varier gerne overførelsteknikken, navnlig hvis du håndterer mange produkter**

**En instruktionsvideo med anvendelse af optimal overførelsteknik kan ses på OUHs hjemmeside:**

**www.ouh.dk – Til samarbejdspartnere – Almen praksis og andre sundhedsfaglige – Afdelingernes rekvisitioner, henvisninger og håndbøger – Sygehusapotek – For fagpersoner under punktet Klar-til-brug-lægemidler:**

**[Instruktionsvideo i optimal overførelsteknik](#)** (klik på den blå knap, hvis videoen ikke vises på skærmen)



For spørgsmål vedrørende brugen af produktet: Kontakt **dit sygehusapotek**