

Til almen praksis, som er tilknyttet  
Laboratoriet, Blodprøver og Biokemi  
OUH, Odense

## Kanyleholder med skruegevind og "klik af"

Vi er blevet opmærksomme på, at der har været nogle udfordringer med brugen af kanyleholderen med skruegevind og "klik af". Vi har derfor valgt at fjerne den fra vores [Bestillingsseddel](#), så praksis ikke længere kan bestille den hos Blodprøver og Biokemi.

Der er sket følgende: Under prøvetagning er kanyleholderen hoppet af kanylen, når rørene bliver skubbet på bagkanylen.

Vi har kontaktet firmaet angående problemet, og de er kommet med følgende svar:  
*"Problemet opstår, når kanylen 'skrues over', da dette medfører, at kanylen reelt løsnes fra kanyleholderen med skruegevind og "klik af"*."

De praksis, der allerede har fået udleveret denne holder, bedes nøje følge nedenstående vejledning fra firmaet, hvis I fortsat ønsker at bruge kanyleholderen med skruegevind og "klik af":

1. Når kanylen skrues på kanyleholderen med skruegevind og "klik af", skal der holdes på den blå udløsermekanisme. Markeret med den blå pil på billedet.



2. Hvis kanylen er 'overskruet', vil den blå udløsermekanisme markeret med pilen ikke længere flugte med kanyleholderen, men være 2 - 3 mm forskudt i forhold til kanyleholderen.
3. Er kanylen 'overskruet', kasseres både kanylen og kanyleholder.

Venlig hilsen

**Birgitte Cordt Qvist**  
Laboratoriekonsulent  
Tlf.: 24 62 16 06