

Elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter

Proceduren skal udføres af en person og foretages uforstyrret ved patientens side.


1. Log på EPJ og åbn patientens journal.



2. Åbn menupunktet og vælg *InterInfo-aktuelt sygehus*.


3. Vælg fanebladet *Elektronisk opsætningskontrol*.

< Ny patient Log ud >

 Part of ProSang
by CSAM Health

4. Feltet *Afdeling* skal ikke udfyldes, vælg **Næste**.

< Ny patient Log ud >

 Part of ProSang
by CSAM Health

5. Scan 2D barkoden på patientarmbåndet, hold scanneren på tværs af armbåndet, så den almindelige stregkode ikke scannes. Patientens personnummer fremkommer i feltet Patient-id.



6. Scan de to strekkoder på blodkomponenten, som vist på billedet: først 1 og dernæst 2 (2D barkoden må IKKE benyttes).


| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| Patientinformation | Transfusionsmed. analyser | Blodbestilling | Elektronisk opsætningskontrol | Rapportere | Transfusionshistorik |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|

Opsætningskontrol

Patient-id

Blodkomponent Del 1

Del 2




7. Vælg *Udfør opsætningskontrol*

Opsætningskontrollen er først udført og godkendt, når dette billede vises:

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| Patientinformation | Transfusionsmed. analyser | Blodbestilling | Elektronisk opsætningskontrol | Rapportere | Transfusionshistorik |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|

Opsætningskontrol


 Opsætningskontrol mellem og

Blodkomponenten må transfunderes til ovennævnte patient Reservationstiden er

Patient-id

Blodkomponent Del 1

Del 2



BLODKOMPONENTEN MÅ SÆTTES OP TIL PATIENTEN

Hvis dette billede vises:

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| Patientinformation | Transfusionsmed. analyser | Blodbestilling | Elektronisk opsætningskontrol | Rapportere | Transfusionshistori |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|

Opsætningskontrol



Opsætningskontrol mellem
XXXXXX-XXXX
og
V00421442640442 E3846000:
Blodkomponenten er ikke reserveret til patienten. Kontakt blodbanken.

Patient-id

Blodkomponent Del 1

Del 2



BLODKOMPONENTEN MÅ IKKE SÆTTES OP TIL PATIENTEN.

Kontakt blodbanken

8. Ved elektronisk opsætningskontrol transfusionsregistreres blodkomponenten samtidig.

Håndtering af blodpose og transfusionsjournal

Efter transfusion kan blodposen kasseres, og transfusionsjournalen makuleres.

Håndtering af transfusionskomplikation

I tilfælde af transfusionskomplikation kontaktes den lokale blodbank. Ved alvorlig transfusionskomplikation kontaktes KIAs vagthavende læge (6541 3930) umiddelbart med henblik på udredning, behandling og registrering i DART (Dansk Registrering af Transfusionsrisici).

Returnering af ikke anvendte blodkomponenter

Hvis den udleverede blodkomponent ikke anvendes til den pågældende patient, skal blodkomponenten så hurtigt som muligt returneres til blodbanken.