

Inden portøren ankommer til jeres praksis, skal prøverne være pakket efter følgende vejledning

- 1. Prøver til Blodprøver og Biokemi og KIA** sættes fortløbende i de hvide stativer, hvis de er taget samme dag.
 - Prøver, der ikke er fyldt til markering på røret, pga. f.eks. svær prøvetagning, skal sættes i det røde stativ.
 - Prøver, der udtaget dagen før forsendelse og centrifugerede prøver, skal sættes i det røde stativ.
- 2.** Stativerne sættes i plastposen (med sugende indlæg) i kassen (der skal **altid** være 1 rødt og 4 hvide stativer i kassen).
- 3.** Posen lukkes med plastikklemmen.
- 4.** Låget lukkes.
- 5. Prøver til KMA** placeres i en frysepose, der lukkes med en løs knude. Forsendelseskuverterne og posen med prøver til **KMA** lægges **oven på kassen**.
- 6. Prøver og henvisninger til andre laboratoriemedicinske afdelinger** lægges i respektive adresserede forsendelseskuverter.
- 7.** Hvis der **IKKE** er prøver til Blodprøver og Biokemi og KIA i prøvekassen, sættes denne ikke frem til afhentning.

NB! - Dette er også vigtigt

- At der altid er 1 rødt og 4 hvide stativer i kassen, selvom der f.eks. kun er prøver i ét stativ.
- At prøverne sættes samlet for at lette udpakningen på laboratoriet.
- At prøver og forsendelseskuverter til andre laboratorier lægges oven på kassen.



Obs. Alle skruelåg skal være forsvarligt påsat, så der ikke løber væske ud

Husk, prøverne skal være på laboratoriet senest 6 timer efter prøvetagningen.