

F&P my820 fugter og slangesystem

Tillægskapitel

Indhold

Dette tillægskapitel handler om brugen af fugteren **my820** samt tilhørende fugterkammer og respiratorslanger.

my820-fugteren anvendes sammen med fugterkammeret **HC300** og en opvarmet respiratorslange (**Evatherm**). Systemet anvendes typisk kun på kørestolen og brugeren vil i dette tilfælde have en AIRniva-fugter på sengerespiratoren (se *Kompetencevurdering* og/eller, hvis relevant, tillægskapitel herom).

Du kan se, hvilket system den enkelte bruger har i brugerens *behandlingsoversigt*.

Vigtigt: Dette kapitel er kun et tillæg. Du skal også læse materialet om fugter og slangesystem i dokumentet *Kompetencevurdering*.

my820

I dette afsnit gennemgås fugteren, det tilhørende respiratorslangesæt og fugterkammeret.

Fugter

Fugteren har fire niveauer og fungerer med tilhørende respiratorslangesæt (Evatherm).


Betjening og justering:

- Tilslut strømledning til stikkontakt
- Tænd fugteren med et kort tryk på standby-knappen
- Udfør opstartskontrol: Lyt efter et bip og se efter at alle indikatorer lyser kortvarigt fra venstre mod højre - kan dette ikke bekræftes, bør fugteren genstartes og løser dette ikke problemet, bør RCS kontaktes
- Opvarmningstid: Under opvarmning vil indstillingsindikatorerne lyse med skiftvis falmende lys op til det niveau, fugteren er indstillet til. Dette kan også ske, hvis fugterniveauet øges eller der påfyldes vand. Når fugteren har opnået det indstillede niveau, vil indstillingsindikatorerne lyse konstant
- Tryk på indstillingsknappen for at ændre fugtighedsindstillingen (temperatur), dvs. niveau 1-4
- Sluk fugter ved at holde Standby-knappen inde. Sluk fugter før respirator



Driftstilstand og alarmer;

- Ved normal drift lyser ingen af alarmindikatorerne (dioderne til højre). Alarmindikatorerne beskrives herunder fra venstre mod højre;
 1. Kontrollér vand; angiver, at kammeret muligvis skal genopfyldes
 2. Lydalarmer sat på pause; angiver, at lydalarmer er sat på pause
 3. Forsigtig; Angiver en befugterfejl
 4. Kontrollér varmeledning; angiver et problem med patientslangen
- Ved lav prioritetsalarmer lyser alarmindikatoren konstant. Ved mellemhøj prioritetsalarmer blinker alarmindikatoren og en lydalarm aktiveres (3 bip, gentaget hvert 5. sek.)
- For yderligere detaljerede alarmbeskrivelser, se s. 72 i brugermanual.

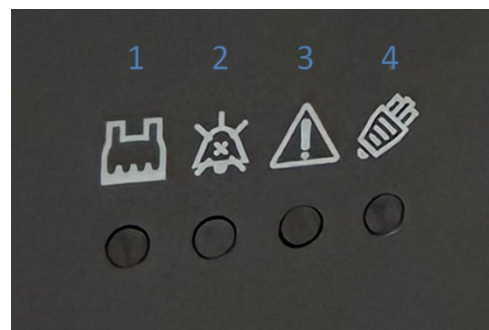


Fugterkammer

Fugterkammeret HC300 består af to dele. Bunden, som består af en metalplade og en plastikkant med en gummiring og selve kammeret. Når de to dele samles, skal kammeret presses ned over gummiringen i bunden. Vær opmærksom på, at gummiringen ikke må bøjes nedad, da dette vil gøre fugterkammeret utæt.

På kammeret findes:

- To udtag til respiratorslanger
- En sort streg, der angiver maksimal vandpåfyldning

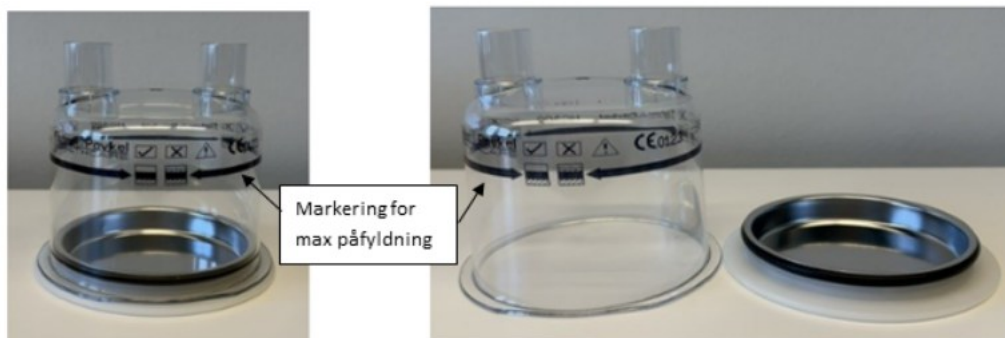


Fugterkammeret monteres på følgende måde:

1. Tryk det blå monteringsbeslag på fugteren ned
2. Indsæt fugterkammeret
3. Slip monteringsbeslaget

Vigtigt opmærksom på, at de to dele ikke adskilles under monteringen på fugteren.

Opvarmet respiratorslangesæt

Respiratorslangesættet Evatherm skal bruges sammen med fugteren my820. Sættet består af en kort respiratorslange, et samlestykke, samt en lang respiratorslange med varmetråd (150 cm), som kobles direkte til fugteren via varmeledningsadptoren.

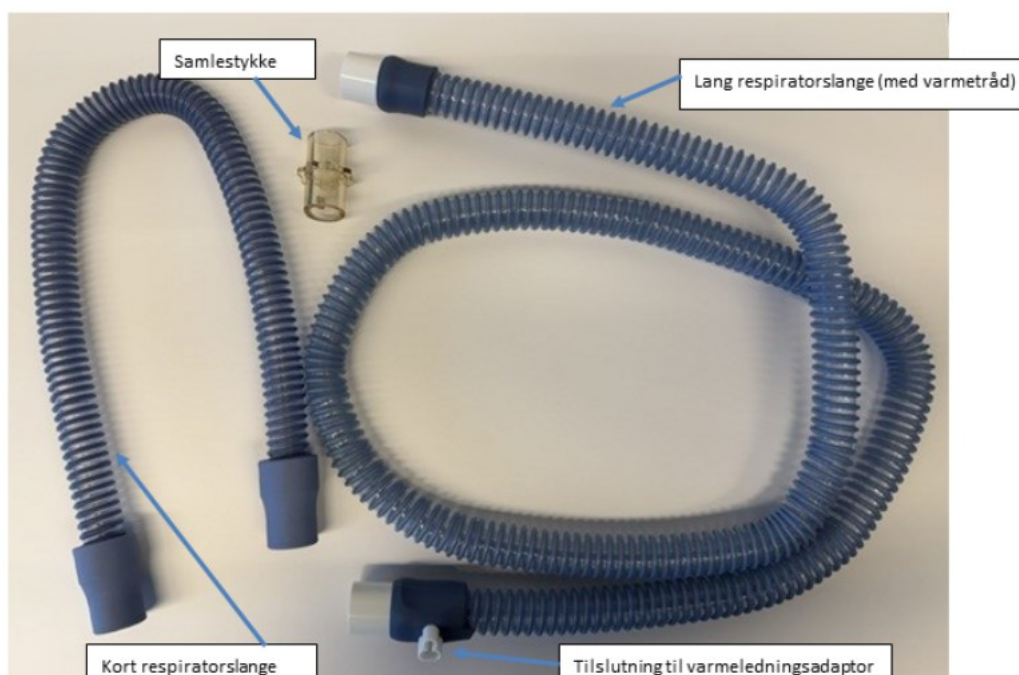

Montering og anvendelse;

- Tilslut den korte respiratorslange mellem fugterkammer og respirator
- Tilslut den lange respiratorslange mellem fugterkammer og det lille kredsløb - den ende med tilslutning til varmeledningsadaptor tilsluttes til fugterkammer, den anden ende til det lille kredsløb
- Tilslut varmeledningssadptoren til den lange respiratorslange
- Tænd respirator
- Tjek at varmeledningsindikatoren lyser grønt
- Afmontering: Træk varmeledningsadptoren ud af den lange respiratorslange, afmonter slangerne fra fugterkammeret
- *Rengøring og udskiftning:* Følg vanlige anvisninger i *Kompetencevurdering*. Efter vask af respiratorslangen bankes let og forsigtigt på enden for tilslutning, for af fjerne overskydende vand fra stikporten

