

AIRniva fugter og slangesystem

Tillægskapitel

Indhold

Dette tillægskapitel handler om brugen af fugteren **AIRniva** samt tilhørende fugterkammer og respiratorslanger.

AIRniva-fugteren anvendes sammen med fugterkammeret **VHC-25** og enten:

- en opvarmet respiratorslange (**Hypernite**), eller
- en almindelig respiratorslange (ej beskrevet her – se *Kompetencevurdering*).

Du kan se, hvilket system den enkelte bruger har i brugerens *behandlingsoversigt*.

Vigtigt: Dette kapitel er kun et tillæg. Du skal også læse materialet om fugter og slangesystem i dokumentet *Kompetencevurdering*.


AIRniva

I dette afsnit gennemgås først selve fugteren og efterfølgende fugterkammer og slangesystem, der passer til.

Fugter

Fugteren har 3 niveauer for befugtning. Det tager typisk 15, maksimalt 30 minutter, at opvarme vandet i fugteren, så det kan være en god ide at tænde for opvarmningsdelen, inden brugeren skal tilsluttes.

Forside og bagside;

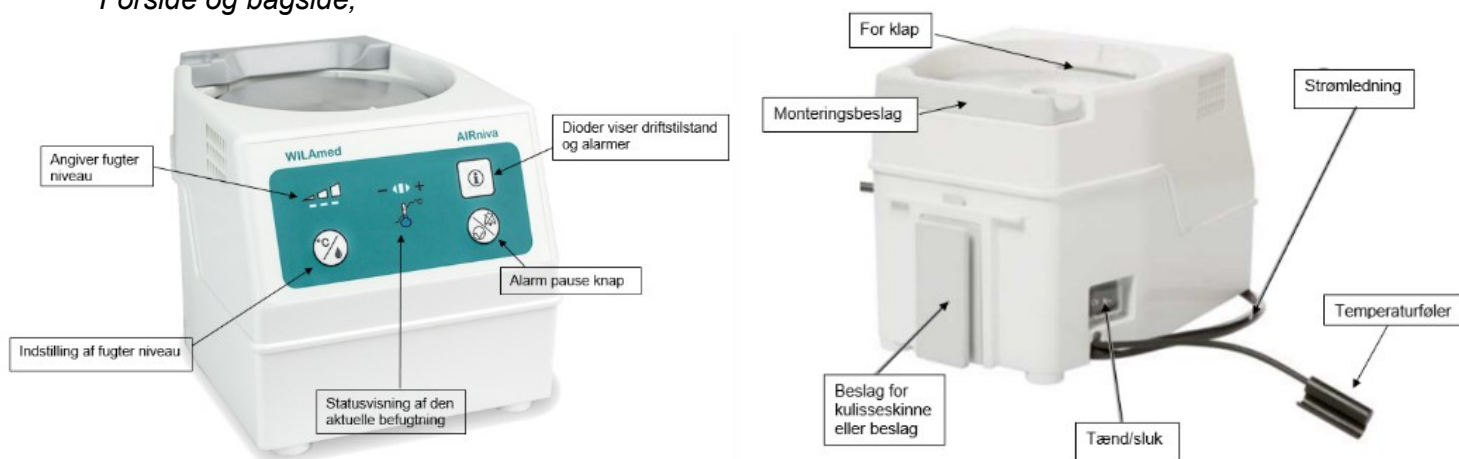

Betjening og justering;

- Fugteren tændes/slukkes bagerst i venstre side
- For at justere befugtningssniveauerne, holdes knappen for "indstilling af fugter niveau" nede i 3 sekunder. Der kan nu vælges mellem niveauerne 1 (lav), 2 (medium) og 3 (høj). Det valgte niveau ses i ikonet oven over. I midten ses en "Statusvisning af den aktuelle befugtning". Lyser den midterste streg grønt, er det ønskede befugtningssniveau opnået. Lyser pilene mod venstre eller højre orange, indikerer det at befugtningen er mindre eller højere end den indstillede værdi

Driftstilstand og alarmer;

- Øverst til højre ses et ikon med en diode i hvert hjørne, som viser fugterens driftstilstand. Dioderne er ikke tændt ved denne opsætning, når denne fungerer korrekt. Ved alarmer og fejl vil dioderne lyse/blink anhangig af fejlen og fugteren vil afgive en alarmlyd
- Nederst til højre findes en "alarm pause knap". Ved at trykke på denne gøres alarmer lydløs i 120 sekunder. Løses årsagen til alarmer ikke inden for 10 minutter, skifter fugteren til "OFF"-tilstand (indikeres af diagonalt blinkende dioder). Da vil fugteren lave en tvungen nedlukning og starter først igen efter genstart *efter* afkøling
- Se fugterens manual for yderligere beskrivelse af fejl og alarmer


Fugterkammer

Fugterkammeret VHC-25 består af to dele. I bunden sidder en metalplade og i toppen, hvor kammeret adskilles, sidder en tætningsring. De to dele drejes sammen, indtil kammeret slutter tæt.

På kammeret findes:

- To udtag til respiratorslanger
- En sort streg, der angiver maksimal vandpåfyldning
- En lille studs med låg (denne anvendes ikke).

Vigtigt: Der skal altid sidde låg på studsen, da systemet ellers bliver utæt.

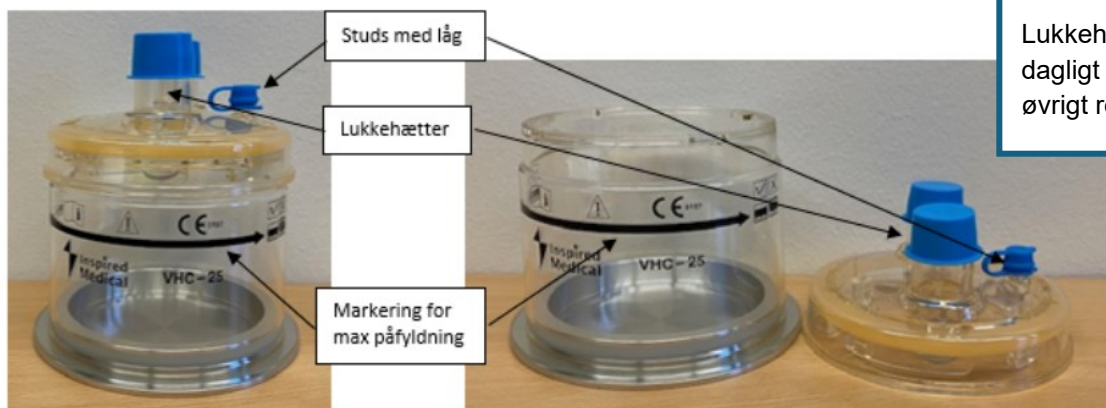

Der medfølger to lukkehætter til slangeudtagene. Disse kan med fordel anvendes på et rengjort og tørt fugterkammer, så det holdes rent inden brug.

Lukkehætterne vaskes dagligt sammen med øvrigt respiratorudstyr.

Fugterkammeret monteres på følgende måde:

1. Tryk det grå monteringsbeslag på fugteren bagud
2. Placer fugterkammeret ned under for-klappen på fugteren
3. Slip monteringsbeslaget

Vær opmærksom på:

Fugterkammerets kant skal sidde korrekt under både for-klappen og monteringsbeslaget.

Opvarmet respiratorslange


Hypernite er en opvarmet respiratorslange, den er 1,83 m lang og skal tilsluttes en medfølgende strømforsyning.

Den bruges som udgangspunkt til sengerespirator, men kan også bruges til kørestolsrespirator.

Ved brug på kørestol, skal man være opmærksom på, at slangen er længere end nødvendigt. Derfor er det vigtigt at fæstne slangen, så den ikke hænger løst og risikerer at sætte sig fast eller blive utilsigtet frakoblet.

Den består af:

- En opvarmet respiratorslange med en stikport til strømforsyning
- 1 strømforsyning med tænd/sluk knap

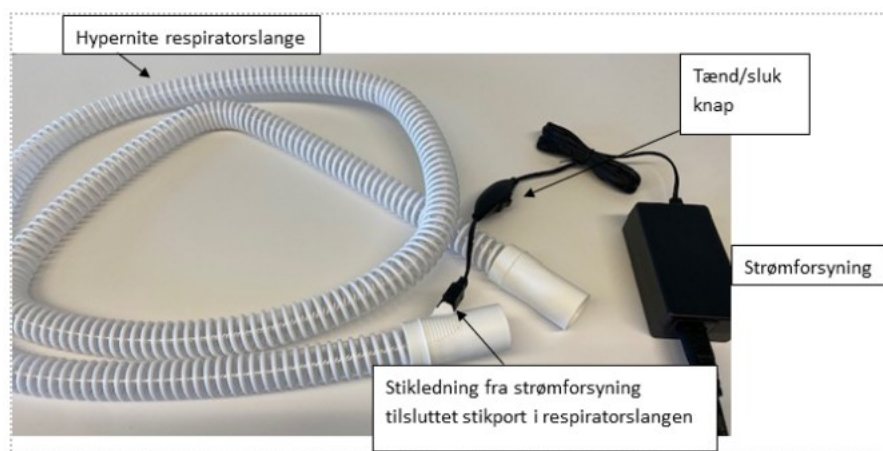

Montering og anvendelse;

1. Tilslut en alm. kort respiratorslange mellem fugterkammer og respirator
2. Tilslut Hypernite respiratorslange mellem fugterkammer og det lille kredsløb. Den ende på hyperniteslangen, hvor der er en stikport til strømforsyning, placeres på fugterkammer
3. Tilslut ledning fra strømforsyning til stikporten på hypernite respiratorslangen. Sikr at "tænd/sluk" knappen er slukket og tilslut strømforsyning til stikkontakt.
4. Når der er tændt for respirator, tændes på "tænd/sluk"-knappen på stikledningen på hypernite respiratorslangens strømforsyning.
5. Umiddelbart før respiratoren slukkes, skal der først slukkes for hypernite respiratorslangen. Stikledningen frakobles ved at trykke på låsemekanismen herpå.
6. **Rengøring og udskiftning:** Følg vanlige anvisninger i *Kompetencevurdering*. Efter vask af respiratorslangen bankes let og forsigtigt på enden for tilslutning, for af fjerne overskydende vand fra stikporten

