

		Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.				Niveau: Øvrigt 
FISH CLL perifert blod og knoglemarv						Godkendt af: Annelise Olsen
Dokumentbrugere: OUH /Ekssamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Anne Nibe	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 509508 /	Ref.	Version: 2	16.07.2024

- 1) Indikation
- 2) Analysesprincip
- 3) Prøvemateriale
 - 3.1) Bestilling af dyrkningsmedie
- 4) Rekvisition
- 5) Prøveforsendelse
- 6) Indleveringsfrister/åbningstider
- 7) Telefon ved forespørgsler
- 8) Bemærkninger

1) Indikation

Til prognosticering ved CLL.

2) Analysesprincip

Prognosticering ved hjælp af fluorescens in situ-hybridisering.

3) Prøvemateriale

Mængde:

- Perifert blod: 7-10 ml blod i EDTA.
- Knoglemarv: 3-5 ml knoglemarvsaspirat i 10 ml dyrkningsmedie.

3.1) Bestilling af dyrkningsmedie

- Dyrkningsmedie rekvireres på tlf. 65 41 37 45.
- Mediet kan stå i køleskab 1 uge eller opbevares ved -20°C i 6 måneder.

4) Rekvisition

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra EPJ, der henviser til cytogenetisk undersøgelse.
- For rekvirenter udenfor Region Syddanmark udprintes rekvisition seddel, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.
- Der henvises til AKPs brugerhåndbog: [Rekvisitionsseddel](#)

5) Prøveforsendelse

- Perifert blod fremsendes samme dag eller som ekspres post og **SKAL** være AKP i hænde indenfor 24 timer.
- Knoglemarv skal modtages på AKP samme dag, som prøvematerialet er udtaget. Sendes ved stuetemperatur.
- Meldes på tlf. 65 41 37 45.

6) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstid: Mandag til fredag kl. 8-15.30
- Lukket weekend og helligdage
- Prøver med ankomst efter kl. 15.30 **SKAL** varsles senest kl. 15 på tlf. 65 41 37 45.

Hasteprøver:

Meldes til sekretariat på tlf. 65 41 48 06 og aftales med patolog.

Endvidere meldes tidspunkt for ankomst af hasteprøver til laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.

Ved ankomst efter kl. 15.30:

Hoveddør:

Laboratoriet kontaktes vha. dørklokke til venstre for hovedindgangen. Tast "B+3745" eller tlf. 65 41 37 45

7) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedrørende prøveforsendelse, melding af prøve:
 - Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedrørende prøvesvar og hastesvar:
 - Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

8) Bemærkninger

FISH analysen laves en gang om ugen.

Ændringslog

Version	Godkendt	Revisionsinformation
2	16.07.2024	Revideret med synlig indholdsfortegnelse samt tilføjet link til rekvisitionsseddel (afsnit 4).
1.4	17.11.2022	
1.3	23.02.2022	