

1.

Fjern den gule sikkerhedslås ved at skubbe her med tommelfingeren.



2.



Hold på den grønne omløber og drej den **med** uret helt i bund.


4.



Halsen **skal** være tomt for væske.

Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset **opad** som vist. Pump væsken tilbage i infusionsbeholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. **Gentag punkt 3 og 4.**

6.

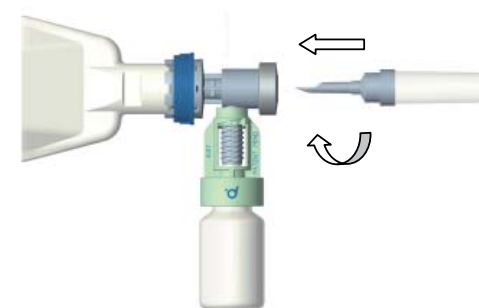

Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummi-proppen. Sørg for at infusionssættets spids er helt i bund.

3.



Halsen **skal** være fyldt med væske.

Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset **nedad** som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst.

5.



Fjern beskyttelsehætten fra DivibaX<sup>®</sup>. Desinficer gummiproppen med sprit.

7.



Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX<sup>®</sup>. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed).

## Hvad er DivibaX<sup>®</sup> ?

DivibaX<sup>®</sup> er en overføringskanyle beregnet til anvendelse sammen med SAD-infusionsvæsker.

### DivibaX<sup>®</sup> er en overføringskanyle med mange fordele:

- DivibaX<sup>®</sup> er beregnet til overføring af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i et lukket system, så der ikke sker forurening af hverken aktivt stof, infusionsvæske eller omgivelser.
- Adgangen til hætteglassets indhold brydes først, når sikkerhedslåsen fjernes, og der drejes på omløberen.
- Der sker først påvirkning af det aktive stof i forbindelse med opblandingen.
- Infusionsvæsken kan forberedes og færdiggøres, før den skal anvendes.
- Du kan selv samle de tre komponenter - aktivt stof, infusionsbeholder og overføringskanyle. Håndteringen fremgår af brugervejledningen "Anvendelse af overføringskanyle DivibaX<sup>®</sup>".
- DivibaX<sup>®</sup> er fremstillet af polypropylen og polycarbonat, som ved forbrænding nedbrydes til vand og kuldioxid = ingen forurening.
- DivibaX<sup>®</sup> er indfarvet med ugiftige farvestoffer.

Yderligere oplysninger om DivibaX<sup>®</sup> overføringskanyle og det koblede system fås ved henvendelse til det lokale sygehusapotek eller Amgros I/S, tlf. 8871 3000.

DivibaX<sup>®</sup> er et registreret varemærke.

Overføringskanyle er patentanmeldt.

DivibaX<sup>®</sup> fremstilles af:  
Promens Medical Packaging A/S  
Industrivej 6  
5550 Langeskov  
tlf. 6338 1000.



## Håndtering af koblede produkter med DivibaX<sup>®</sup>

