
	Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.					Niveau: Øvrigt	
	Lymfeknuder til flowcytometri						
Dokumentbrugere: OUH /Ekssamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Dorthe Aamose Andersen	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 521616 /	Ref.	Version: 4	29.10.2020	

1) Indikation

Diagnosticering og klassifikation af hæmatologiske sygdomme.

2) Analysesprincip

Flowcytometri anvendes til måling af antigener på/i celler i suspension. Hertil anvendes monoklonale antistoffer, som er mærket med forskellige fluorokromer. Når disse fluorokromer belyses med laserlys udsendes lys med forskellige bølgelængder.

3) Prøvemateriale og rekvision

- Lymfeknude til flowcytometri fremsendes i dyrkningsmedie.
- Dyrkningsmedie rekvireres på telefon 65 41 37 45.
- Dyrkningsmediet opbevares i køleskab i 1 uge eller ved -20°C i 6 måneder.
- Prøve mærkes med patient-ID og stregkode fra Cosmic, der henviser til flowcytometrisk undersøgelse.
- For rekvirenter udenfor OUH udprintes rekvissionseddelen, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.

4) Prøveforsendelse

Lymfeknude fremsendes samme dag efter telefonisk aftale.

5) Indleveringsfrister/åbningstider

Afdelingens åbningstid: Mandag til fredag kl. 8-15.30.

6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedrørende prøveforsendelse, melding af prøve: Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedrørende prøvesvar og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

7) Bemærkninger

Der må ikke sendes prøver fredag med mindre andet er aftalt eller kan modtages inden kl. 12 samme dag.