

Kære Praksisrekvirenter.

Som opfølgning på den regionale skrivelse vedr. skift af formalinbeholdere til vævsprøver, der er sendt den 12. marts 2026, fremsender Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, nedenstående skriv vedrørende brugen af lukkede formalinglas.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er der regionalt taget beslutning om nye lukkede beholdere til forsendelse af biopsier og vævsprøver i stedet for de åbne glas med formalinbuffer.

Det er stadig muligt på bestillingssedlen at rekvirere de såkaldt **åbne beholdere**, dvs. biopsiglas á 40 ml, påfyldt 20 ml formalinbuffer. Disse er velegnede og sikkerhedsmæssigt forsvarlige at anvende, hvis der er etableret anordninger med punktsug til håndteringen.

Det lukkede system hedder **Monovette** og kan rekvireres på AKP's hjemmeside som vanligt, blot skal beholdere og formalindispenser bestilles hver for sig og håndteres som beskrevet nedenfor og i vedhæftede PDF, der kan printes.

Ved problemer med produktet er det leverandør: Hounisen, der skal kontaktes og ikke afdelingen.

De nye beholdere kan bestilles fra 16. marts 2026 og der påbegyndes udlevering umiddelbart herefter.

Monovette-systemet fungerer på følgende måde:

- Biopsi eller vævsmateriale placeres i det tomme forsendelsesrør, hvorpå låg fastgøres og formalin påfyldes ved at udtrække stempel, når spidsen af låget er placeret i formalindispenseren. Der påfyldes formalin som illustreret i videoen og i tilstrækkelig mængde, dvs. i en **ratio ca. 10:1 som minimum**. Man behøver således ikke fylde glasset helt, hvis der er tale om fx en lille biopsi.
Husk: påfør relevant patient-ID på prøverør inden afsendelse til Klinisk Patologi. Forsendelse sker på samme måde som tidligere.
- Instruktionsvideoen kan ses på YouTube: <https://youtu.be/93LqCUI91L4>.
- I AKP's optageområde bliver det muligt at rekvirere det lukkede Monovette-system, hvor man som praksis kan anmode om:

Opsamlingsrør på hhv. 9 og 25 ml	
450 ml formalindispenser	

- Selve metalholderen, der vises i instruktionsvideoen, kan praksis anskaffe ved henvendelse til leverandøren **Hounisen på tlf.: 86 21 08 00**. Systemet fungerer fint uden holderen.

- Ved problemer med produkterne bedes man henvende sig direkte til leverandøren og ikke til afdelingen. Hounisen kan træffes på telefon: 86 21 08 00 eller salg@hounisen.com.
- Prøverør og formalindispenser kan rekvireres via:
 - [Afdeling for Klinisk Patologi OUH Odense Hospital - Svendborg Sygehus](#) → Brugerhåndbog for rekvirenter → Bestilling af utensilier og papirvarer
- eller*
- OUH.dk/lkobestillingssedler → Afdeling for Klinisk Patologi → Bestilling af utensilier og papirvarer
- På bestillingssedlen ligger også et link til ovenstående instruktionsvideo.
- Ved spørgsmål til bestilling rettes henvendelse til:
 - Ledelsessupporter på AKP, Birgitte Dyhr, tlf. 51 42 65 67
 - Overbioanalytiker i histologien, Maiken Rosager, tlf. 51 42 80 81